

介護ベッドをご使用頂いている皆さまへ

介護ベッドのサイドレール・手すり等による 事故等についてのご注意

日頃、製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

昨今、介護ベッドの使用における事故が少なからず発生しており、使用者の生命に関わる重大な事故も複数件発生していることが明らかになっております。事故防止のためには、製品そのものが安全であることは当然ですが、ご使用される皆さまにおいてもお使いの介護ベッドの特性をご理解いただき、取扱い説明書等に記載されている注意事項をお守りいただきご使用されることが安全確保の上で欠かせません。

つきましては、これまでに発生した事件事例を踏まえ、事故の発生を未然に防止するためにご使用者の皆さまにお守りいただきたい注意事項をご紹介しますので、以下についてご確認ください。



フランスベッド株式会社

サイドレール・手すりのすき間について

サイドレールや手すりは用途により形状や構造が異なるため、いろいろなすき間を内包しています。また、こうした製品内部のすき間ばかりでなく、ベッド本体との組み合わせによっても同様のすき間が生じることになります。このようなすき間によりベッド上で療養される方々の視野が確保されるとともに、閉塞感が軽減され、療養環境の向上にも繋がります。

しかし、このすき間に挟まれることにより事故が発生することがあります。特にベッド上で予測できない行動をとる可能性がある方や、自力で危険な状態から回避することができない方などにはご注意ください。

また、こういった方に使用する際は、すき間をクッション材や毛布で埋めるなど事故を防止するための工夫をお願いします。

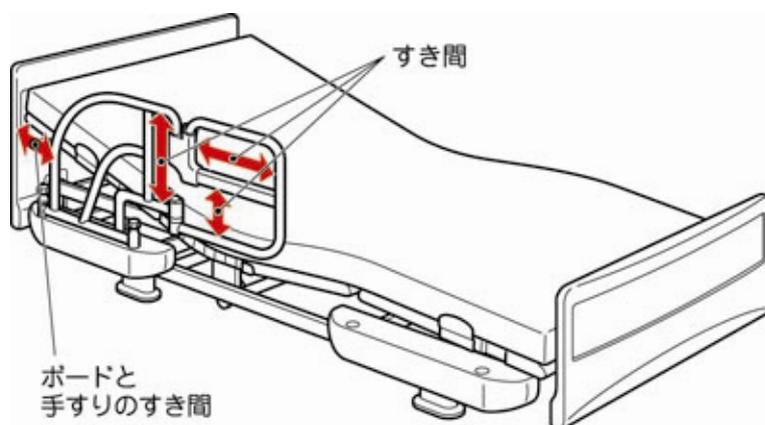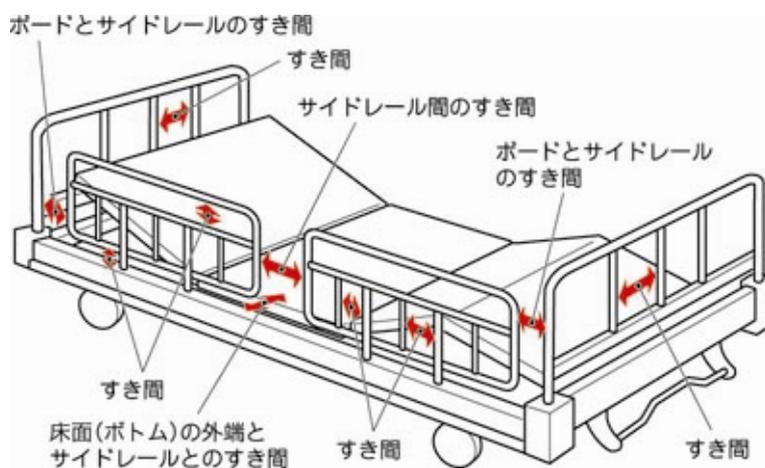

すき間による事故事例

事例1：ベッドの外で転倒してサイドレールと手すりのすき間に首がはさまり死亡した。

事例2：使用者がベッドの端に座り左手で手すりの開放部分をつかんでいたが、踏ん張りがきかず、床へずり落ちてしまった。その際、手すりの折れ曲がる部分に左手上腕部がはさまり怪我を負った。

事例3：手すりのすき間で首を吊った状態で発見され病院に運ばれたが死亡した。

事例4：サイドレールのすき間に首を入れ、窓を開閉しようとした際にリモコンスイッチが入ったため背上げ部分が作動し、ベッドの背とサイドレールとの間に首がはさまって窒息死していた。

事例5：サイドレールとサイドレールのすき間に首をはさまれ死亡した。

●注意事項

- サイドレールや手すりのすき間、ボードとのすき間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので、注意してください。
- 身体の一部（特に頭や首）がサイドレールや手すりにあたり圧迫されると身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので、注意してください。
- サイドレールや手すりは、ベッドで寝ている人の転落や寝具の落下を予防するための製品ですので腰掛けたりしないでください。負荷に耐えられず製品が破損又は固定が解除されることによって転倒するおそれがあります。
- 身体の一部（特に頭や首）がすき間に入った状態でベッドを操作するとはさまれて身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。
- ベッドと異なるメーカーのサイドレール等を使用した場合、通常よりもすき間が大きくなって、ベッドで寝ている人の転落や寝具の落下を予防することが出来なくなるおそれがありますので組み合わせないでください。

すき間以外の事故事例

事例1：手すりに捉まりベッドから立ち上がろうとした際、固定されていたはずの手すりが動き、転倒し、肋骨にひびが入った。

事例2：着衣がベッドの手すりの固定用ノブに引っかかり頸部圧迫をおこし、窒息により死亡した。

事例3：被介護者が可動式サイドレールにつかまり立ちしたところ、金具が破損しバランスを崩して転倒したため介護者が首と肩を打撲した。




●注意事項

- 思わぬけがをしないように、製品に異常（手すり本体がぐらついたり、ストッパーの固定が出来ないなど）がないか定期的に点検してください。
- サイドレールや手すりの操作がうまくできない方には、転落等の事故を防止するためにも操作させないでください。
- 固定（ロック）は確実に行ってください。
- ベッドの上からサイドレールや手すりを操作する際は転落に注意してください。

尚、弊社では、安全にご使用していただくために、すき間を減らす部品等を用意しておりますのでご利用ください。

弊社サイドレール・手すりのご紹介

弊社が過去より販売しております、手すり・サイドレールの情報を、以下のページでご紹介しておりますので、下の写真を参考にして、該当の商品情報をご覧ください。
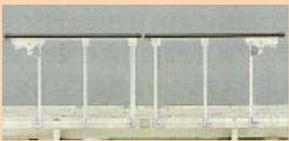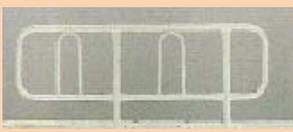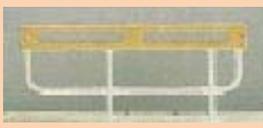
| 商品名 | | 商品写真 | | より安全にご使用 頂く為の安全グッズ | 掲載 ページ |
|----------------------------|--|---|--|---|-----------|
| 手 す り | マルチ移動支援バー SE-07 |  | | 保護ベルトA 保護ベルトC1 | 4 ページ |
| | マルチ移動支援バー SE-07NHC |  | | 保護ベルトC1 | 5 ページ |
| | マルチ移動支援バー SE-07J |  | | 保護ベルトC2 | 6 ページ |
| サ イ ド レ ー ル | SR-722・R-110D |  | | SR-722 サイドレール用カバー (SR-110D共通) | 7 ページ |
| | SR-723・R-115D |  | | SR-723 サイドレール用カバー (SR-115D共通) | 8 ページ |
| | SR-100 (左) SR-100N (右) |  |  | サイドレールスペーサー サイドレールストッパー サイドレールカバー | 9 ページ |
| | SR-103 (左) SR-102 (右) SR-105 (下) |  |  | サイドレールストッパー サイドレールカバー | 10 ページ |
| | |  | | | |

尚、弊社では、上記商品を、より安全にご使用していただくために、すき間を減らす部品等を用意しておりますので、是非ご利用ください。


SE-07をご使用のお客様へ

マルチ移動支援バー（SE-07）はベッド上での起き上がりやベッドからの立ち上がりの動作を補助するための製品で、サイドレールと同様にベッドの付属品孔を利用して装着するものです。

ご使用上の注意

SE-07は固定された手すり部と、着脱可能なサイドレール部とで構成された手すりです。


- 付属の取扱説明書を良くお読みになった上でご使用ください。
- 手すりのロック操作がうまくできない方、足腰が不安定な方の使用の際には、転落・転倒等の事故を防止するためにも、介助者が付き添った上でご使用ください。
- 着脱できるサイドレール部は必ず写真の様に取付けてください。
逆さ方向に取付けますと大きな隙間ができ、体がズレ落ちるなど、生命にかかわる事故になることがあります。

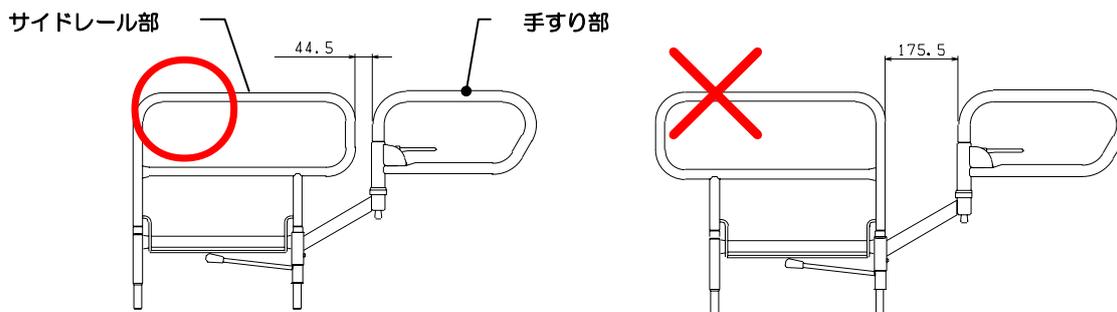

- 手すり部とサイドレール部には内包された隙間があります。すき間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。
- 思わぬけがをしないように、製品に異常（手すり本体がぐらついたり、ストッパーの固定が出来ないなど）がないか定期的に点検してください。（ノンサイドタイプには専用のホルダーが必要です。）

***** 更に安全にご使用になる為に（安全グッズのご案内） *****

SE-07には、更に安全に使用していただく為に、隙間を減らす部品を用意しています。

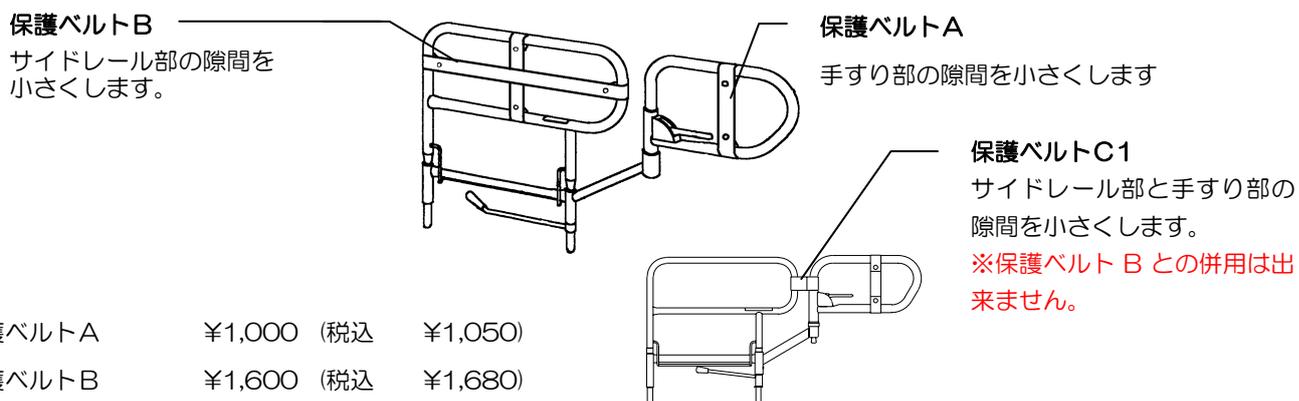

| | | | |
|---------|--------|------|--------|
| 保護ベルトA | ¥1,000 | (税込) | ¥1,050 |
| 保護ベルトB | ¥1,600 | (税込) | ¥1,680 |
| 保護ベルトC1 | ¥ 830 | (税込) | ¥ 871 |
| サイドホルダー | ¥1,600 | (税込) | ¥1,680 |

※保護ベルトBとの併用は出来ません。

SE-07NHC をご使用のお客様へ

マルチ移動支援バー（SE-07NHC）はベッド上での起き上がりやベッドからの立ち上がりの動作を補助するための製品で、サイドレールと同様にベッドの付属品孔を利用して装着するものです。

ご使用上の注意


SE-07NHC は固定された手すり部と、着脱可能なサイドレール部とで構成された手すりです。

- 付属の取扱説明書を良くお読みになった上でご使用ください。
- 手すりのロック操作がうまくできない方、足腰が不安定な方の使用の際には、転落・転倒等の事故を防止するためにも、介助者が付き添った上でご使用ください。
- 手すり部とサイドレール部には内包された隙間があります。すき間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。
- 思わぬけがをしないように、製品に異常（手すり本体がぐらついたり、ストッパーの固定が出来ないなど）がないか定期的に点検してください。（ノンサイドタイプには専用のホルダーが必要です。）



***** 更に安全にご使用になる為に（安全グッズのご案内） *****

SE-07NHC には、更に安全に使用していただく為に、隙間を減らす部品を用意しています。

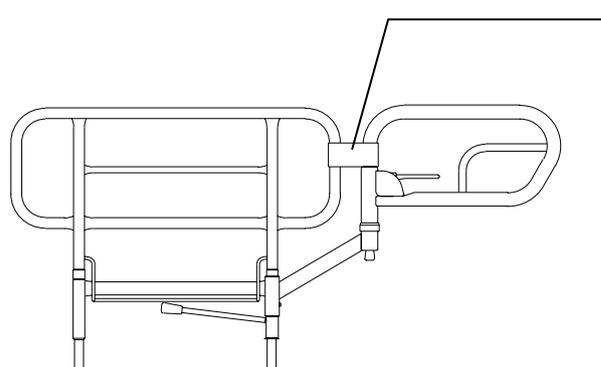

保護ベルトC1
サイドレール部と手すり部の
隙間を小さくします。

| | | | |
|---------|--------|------|---------|
| 保護ベルトC1 | ¥ 830 | (税込) | ¥ 871) |
| サイドホルダー | ¥1,600 | (税込) | ¥1,680) |

SE-07Jをご使用のお客様へ

マルチ移動支援バー（SE-07J）はベッド上での起き上がりやベッドからの立ち上がりの動作を補助するための製品で、サイドレールと同様にベッドの付属品孔を利用して装着するものです。

ご使用上の注意


SE-07Jは固定された手すり部と、着脱可能なサイドレール部とで構成された手すりです。

- 付属の取扱説明書を良くお読みになった上でご使用ください。
- 手すりの操作がうまくできない方には、転落等の事故を防止するためにも操作させず、介助者が付き添った上でご使用ください。
- 手すり部とサイドレール部には内包された隙間があります。すき間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。
- 思わぬけがをしないように、製品に異常（手すり本体がぐらついたり、ストッパーの固定が出来ないなど）がないか定期的に点検してください。（ノンサイドタイプには専用のホルダーが必要です。）



***** 更に安全にご使用になる為に（安全グッズのご案内）*****


SE-07Jには、更に安全に使用していただく為に、隙間を減らす部品を用意しています。

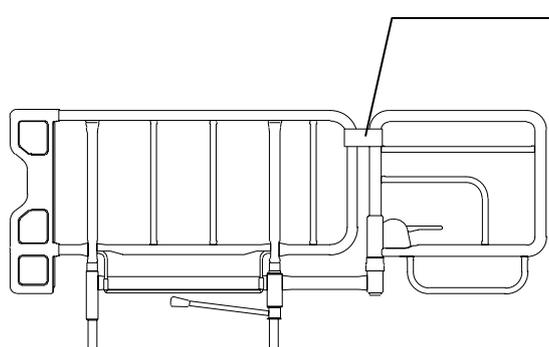

SE-07J

保護ベルトC2

サイドレール部と手すり部の隙間を小さくします。

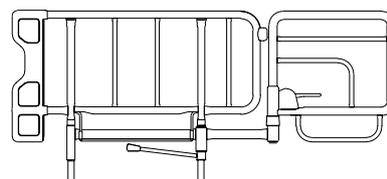

SE-07JN

SE-07JN は隙間を小さくする部品が取付けられています。

| | | |
|---------|------------|---------|
| 保護ベルトC2 | ¥ 830 (税込 | ¥ 871) |
| サイドホルダー | ¥1,600 (税込 | ¥1,680) |

SR-722・SR-110D をご使用のお客様へ

折り畳み式サイドレール（SR-722・SR-110D）はベッドからの転落や寝具のずれ止めを目的としたサイドレールです。ベッドの付属品孔を利用して装着し着脱をしないでベッドからの乗降りを可能にした商品です。




ご使用上の注意

折り畳み式サイドレールは上端に設置された部分にロックレバーがあり、容易に固定することができます。

- 付属の取扱説明書を良くお読みになった上でご使用ください。
- 操作がうまくできない方には、転落等の事故を防止するためにも操作させず、介助者が付き添った上でご使用ください。




- サイドレール部には内包された隙間があります。すき間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。
- 思わぬけがをしないように、製品に異常（サイドレール本体がぐらついたり、ストッパーの固定が出来ないなど）がないか定期的に点検してください。（本体を取付けているネジも確認してください。）
- ロックレバーの操作は、指の挟み込みに注意して行ってください。
- 折り畳み式サイドレールの取付け方向によっては、背上げをしたマットレスとサイドレールがVの字に生る場合があります。この隙間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。

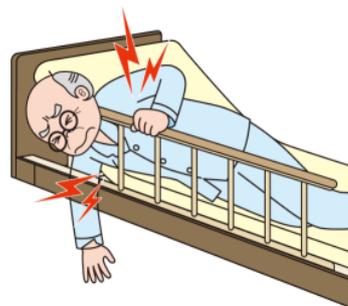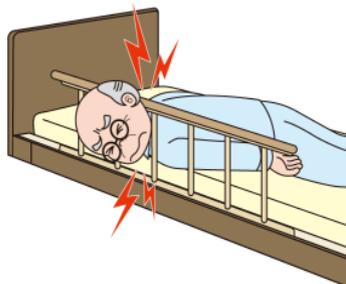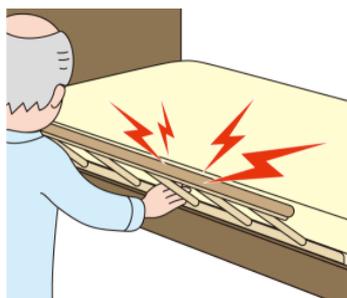

***** 更に安全にご使用になる為に（安全グッズのご案内） *****

SR-722・SR-110D には、更に安全に使用していただく為に、隙間を減らす部品を用意しています。

・SR-722 サイドレール用カバー
サイドレール部の隙間を小さくします。
(SR-110D 共通)

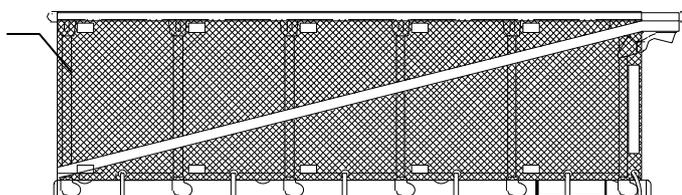

サイドレールカバー ¥25,000 (税込 ¥ 26,250)




SR-723・SR-115D をご使用お客様へ

折り畳み式サイドレール（SR-723・SR-115D）はベッドからの転落や寝具のずれ止めを目的としたサイドレールです。ベッドの付属品孔を利用して装着し着脱をしないでベッドからの乗降りを可能にした商品です。

ご使用上の注意

折り畳み式サイドレールは上端に設置された部分にロックレバーがあり、容易に固定することができます。


- 付属の取扱説明書を良くお読みになった上でご使用ください。
- 操作がうまくできない方には、転落等の事故を防止するためにも操作させず、介助者が付き添った上でご使用ください。
- サイドレール部には内包された隙間があります。すき間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。
- 思わぬけがをしないように、製品に異常（サイドレール本体がぐらついたり、ストッパーの固定が出来ないなど）がないか定期的に点検してください。（本体を取付けているネジも確認してください。）
- ロックレバーの操作は、指の挟み込みに注意して行ってください。
- SR-723・SR-115D を取付けた場合、背上げをしたマットレスとサイドレールがVの字になる場合があります。この隙間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。

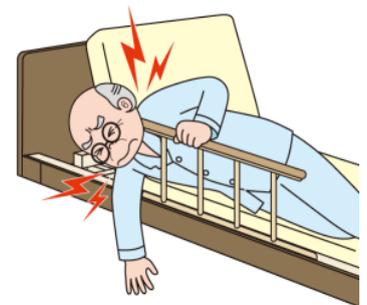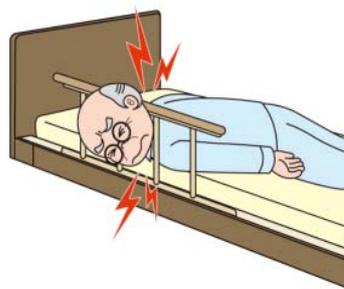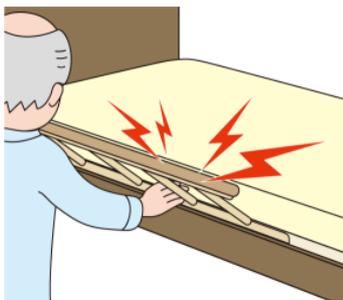

***** 更に安全にご使用になる為に（安全グッズのご案内） *****

SR-723・SR-115D には、更に安全に使用していただく為に、隙間を減らす部品を用意しています。

- ・SR-723 サイドレール用カバー
サイドレール部の隙間を小さくします。
(SR-115D 共通)

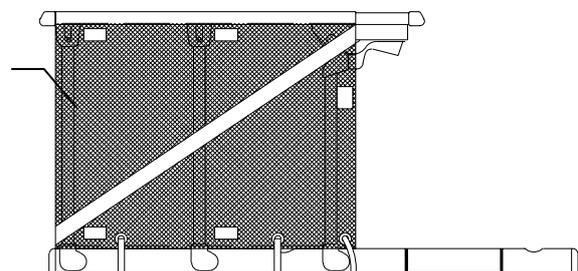

サイドレールカバー ¥23,000（税込） ¥ 24,150


SR-100 をご使用お客様へ

差し込み式サイドレール（SR-100・SR-100N）はベッドからの転落や寝具のずれ止めを目的としたサイドレールです。

ご使用上の注意

差し込み式サイドレールはベッドに最大 4 個取り付けベッドを覆うことが出来ます。


- 付属の取扱説明書を良くお読みになった上でご使用ください。
- サイドレール部には内包された隙間があります。すき間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。
- 思わぬけがをしないように、製品に異常（破損など）がないか定期的に点検してください。
- SR-100 をフレーム中央部に取付けた場合、背上げをしたマットレスとサイドレールがVの字になる場合があります。この隙間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。

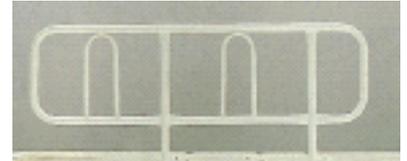

SR-100



SR-100N

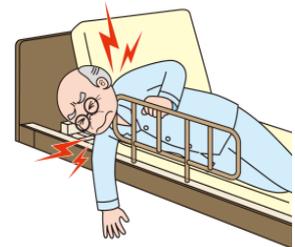


***** 更に安全にご使用になる為に（安全グッズのご案内） *****

SR-100・SR-100N には、更に安全に使用していただく為に、部品を用意しています。



・サイドレールスペーサー


サイドレールとサイドレールの隙間をなくします。

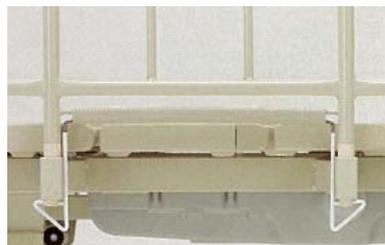

・サイドレールストッパー

サイドレールが不意に抜けることを防ぎます。

※ノンサイドフレーム専用

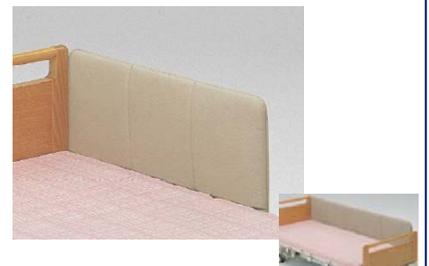

・サイドレールカバー（1 連）

・サイドレールカバー（2 連）

サイドレール部の隙間をなくします。（クッション付）

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| サイドレール用スペーサー | ¥ 1,100 (税込) | ¥ 1,155 |
| サイドレールストッパー | ¥ 2,800 (税込) | ¥ 2,940 |
| サイドレールカバー(1 連) | ¥13,500 (税込) | ¥14,175 |
| サイドレールカバー(2 連) | ¥21,500 (税込) | ¥22,575 |

ご用命の際は、商品名と一緒にご用命下さい。
（例：SR-100サイドレールカバー 2 連用）

SR-103・102 をご使用お客様へ

差し込み式サイドレール（SR-103/102）はベッドからの転落や寝具のずれ止めを目的としたサイドレールです。更に、冷たさを軽減する為に、木（樹脂）材料を施したものです。


ご使用上の注意

差し込み式サイドレールはベッドに最大 4 個取り付けベッドを覆うことが出来ます。

- 付属の取扱説明書を良くお読みになった上でご使用ください。
- サイドレール部には内包された隙間があります。すき間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。
- 思わぬけがをしないように、製品に異常（破損など）がないか定期的に点検してください。
- SR-100 をフレーム中央部に取付けた場合、背上げをしたマットレスとサイドレールがVの字になる場合があります。この隙間に身体の一部（特に頭や首）が入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがありますので注意してください。




SR-103

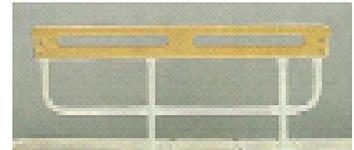

SR-102



SR-105

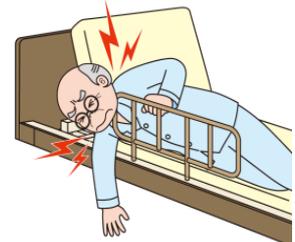

***** 更に安全にご使用になる為に（安全グッズのご案内） *****


SR-103・SR-102 には、更に安全に使用していただく為に、部品を用意しています。



・サイドレールストッパー

サイドレールが不意に抜けることを防ぎます。

- ※ ノンサイドフレーム専用
- ※ 製造の時期によっては取り付けられない場合があります。

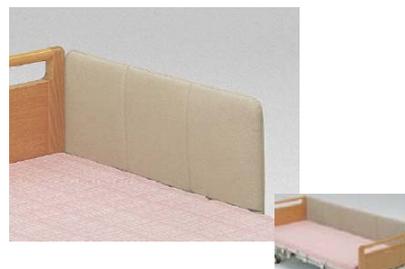

・サイドレールカバー（1 連）

・サイドレールカバー（2 連）

サイドレール部の隙間をなくします。（クッション付）

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| サイドレールストッパー | ¥ 2,800 (税込) | ¥ 2,940 |
| サイドレールカバー(1 連) | ¥13,500 (税込) | ¥14,175 |
| サイドレールカバー(2 連) | ¥21,500 (税込) | ¥22,575 |

ご用命の際は、商品名と一緒にご用命下さい。
 （例：SR-103 サイドレールカバー 1 連用）

※ より安全にご使用いただくための部品の価格は、配送費は別となっております。

※ また、パンフレットに掲載されている内容や商品等については、下記「フランスベッド(株) 消費者相談室」までお気軽にご相談ください。

お客様相談室  フリーダイヤル 0120-39-2824
月～金 9～12時 13～17時 土、日、祭日、年末、年始等は除く
フランスベッド株式会社